

Näo kaitsevisiir "Non-clinical v.2"

Mõõdud: 335x228 mm

Kaal: 75g

Materjal: visiir PETG, kirkas 0,5 mm
rihm PETG, kirkas 1mm

Disain: Creative Critters (Uus-Meremaa)

Tootja: Ohoi OÜ

Telefon: 53 544 754

www.ohoi.ee



[Visiiri montaaži juhend video QR](#)



Kirjeldus: Kaitsevisiir on korduvkasutatav, valmistatud väga hea läbipaistvusega kõrgkvaliteetsest PETG polüestermaterjalist mis on muu hulgas laialdaselt kasutatav meditsiinitoodete valmistamisel. Kaitsevisiir on näost piisavalt eemal, et vältida visiiri uduseks minemist ja on sobilik kandmiseks koos prillide ja hingamisteede maskiga. Visiiri võib puhastada kõigi enamlevinud desinfitseerimisvahenditega sh. alkoholi sisaldavad puhastusained. Kõige mugavam on puhastamiseks visiir lahti võtta, panna alla puhas puuvillane lapp, desinfitseerimis ainega üle pritsida ja seejärel puhta mikrofiiber või puuvillase lapiga õrnalt üle käia.

Kasutamine: Kaitsevisiir tarnitakse kahes osas. Komplekteerimine võtab aega maksimaalselt mõned minutid. Esmalt eemaldage visiirilt ja pearihvalt mõlemalt poolelt kaitsekiled. Paigaldage alltoodud piltide järgi visiiri pearihmi. Paigaldage rihma kinnitus tagant parajasse astmesse, et rihm ei oleks ümber pea väga tihedalt ega ka lödvalt. Õige suuruse reguleerimise korral ei vaja visiir peas pidevat kohendamist. Esmasel kasutusevõtul on soovitatav visiir puhastusainega üle teha, et eemaldada tootmise käigus tekkinud plastjäägi tolm.

PS. Vajadusel kleepige otsmikule rihma sisseküljele visiiriga kaasas olev pehmendusriba.

Visiiri montaaži juhend video leiab aadressilt www.pood.ohoi.ee/kaitsevisiir-non-clinical või skanneerides ülalolevat QR koodi.

